



# ZoomText

**Guida Rapida di Riferimento**

version  
**8.1**



<b>Benvenuti in ZoomText 8.1</b> .....	2	<b>Barra Strumenti Lettore</b> .....	21
Requisiti di sistema.....	3	Attivare e Disattivare Sintesi Vocale ...	22
Installare ZoomText.....	4	Regolare Velocità di Lettura .....	23
Avviare ZoomText.....	5	Impostazioni della Sintesi Vocale .....	24
Interfaccia Utente .....	6	Lettura Tasti .....	25
Abilitare e Disabilitare ZoomText .....	8	Lettura Mouse .....	26
<b>Barra di Ingrandimento</b> .....	9	Livello di Prolissità.....	27
Impostare livello di Zoom .....	10	Lettore Applicazioni (LettApp).....	28
Selezionare Finestra Zoom .....	11	Lettore Documenti (LettDoc).....	30
Regolare Finestra Zoom .....	13	Strumento SpeakIt .....	33
Utilizzare Congela Immagine .....	14	Comandi Lettura Testo .....	34
Utilizzare Modo Vista .....	15	<b>Comandi Rapidi</b> .....	36
Regolazione Colori .....	16	<b>File di Configurazione</b> .....	47
Regolazione Puntatore .....	17	Configurazione di default .....	48
Regolazione cursore .....	18		
Localizzatore Desktop.....	19		
Localizzatore Web.....	20		

## ***Benvenuti in ZoomText 8.1***

ZoomText 8.1 è una applicazione che favorisce l'utilizzo del computer a individui con difficoltà visive. Utilizza due tecnologie versatili – ingrandimento dello schermo e lettura schermo – ZoomText fornisce la possibilità di vedere e sentire ciò che appare sullo schermo del computer, favorendo l'accesso ad applicazioni, documenti, email e Internet.

ZoomText 8.1 è disponibile in due versioni:

*Ingranditore* – un ingranditore di schermo a se stante

*Ingranditore/LettoreSchermo* – un ingranditore e lettore di schermo integrati

Questa guida rapida di riferimento fornisce utili informazioni per l'installazione e l'utilizzo delle principali funzioni di ZoomText Ingranditore e ZoomText Ingranditore/LettoreSchermo. Funzioni di lettura schermo e parlato sono solo disponibili in ZoomText Ingranditore/LettoreSchermo.

**Nota:** Questa guida non descrive tutte le funzioni di ZoomText 8.1, né è da intendere quale sostitutiva alla documentazione completa. Per un informazione esaustiva, fare riferimento alla Guida Utente di ZoomText 8.1 oppure alla guida in linea. Per accedere alla guida in linea, selezionare **Aaiuto**  
▶ **Guida di ZoomText** nella barra menu di ZoomText.

Per eseguire ZoomText 8.1 il vostro sistema deve soddisfare le seguenti caratteristiche:

- Celeron, Pentium II o superiore, AMD K6 o superiore
- Uno dei seguenti sistemi operativi:
  - Windows XP
  - Windows ME (Edizione Millennium)
  - Windows 2000
  - Windows NT 4.0 (SP6)
  - Windows 98
- Minimo 128 MB RAM (256 MB consigliati)
- 25 MB di spazio libero sul disco fisso
- Scheda Audio (solo per la versione *Ingranditore/LettoreSchermo*)

## ***Installare ZoomText***

Quando inserite il CD di ZoomText nel drive del CD-ROM, il programma di Setup partirà automaticamente. Seguite le istruzioni che appariranno sullo schermo per completare l'installazione.

Se il programma di Setup non parte automaticamente

Selezionate **Start** di Windows e quindi **Esegui...**

1. Sfogliate fino al disco CD-ROM.
2. Selezionate il programma Setup e fare click su **Apri**.
3. Fare click su **OK** nella finestra Esegui.


### **Installare ZoomText in ambienti Windows XP, 2000 e NT 4.0**

Quando eseguite Setup in Windows XP, 2000 or NT 4.0, il programma di setup installerà componenti a livello di sistema. Per installare questi componenti dovete avere privilegi di amministratore. Se non avete questo livello d'accesso contattare il vostro amministratore di sistema prima di procedere con l'installazione. Per disinstallare ZoomText

1. Assicuratevi che ZoomText non sia in esecuzione.
2. Nel menu di Start, selezionare **Programmi ▶ ZoomText 8.1 ▶ Disinstallazione di ZoomText 8.1**.
3. Seguite le istruzioni sullo schermo.

Una volta che ZoomText è stato installato sul vostro sistema può essere eseguito utilizzando una delle seguenti procedure.

Per avviare ZoomText

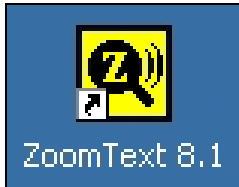

Fare una delle seguenti:

- Fare click sull'icona **ZoomText 8.1** posta sul Desktop di Windows.
- Nel menu di Start, selezionare **Programmi ▶ ZoomText 8.1 ▶ ZoomText 8.1**.

All'esecuzione di ZoomText, il vostro schermo verrà ingrandito. Muovendo il mouse, scrivendo del testo e navigando tra le vostre applicazioni, la porzione di schermo ingrandita vi seguirà automaticamente mantenendo la zona di attività sempre a vista.


Se avete installato ZoomText Ingranditore/LettoreSchermo, ZoomText scandirà a voce le operazioni contestualmente alle azioni che eseguirete all'interno delle vostre applicazioni o documenti. Tutti i programmi Windows continueranno a funzionare regolarmente mentre ZoomText è in esecuzione.

### ▶ Uscire da ZoomText

Nel menu File, selezionare Esci.

# Interfaccia Utente ZoomText

All'avvio di ZoomText l'interfaccia utente appare sullo schermo. Questa finestra contiene tutti i comandi per operare ZoomText. Gli attributi associati all'ingrandimento e la lettura di schermo sono raggruppati in barre strumenti e dialoghi separati.

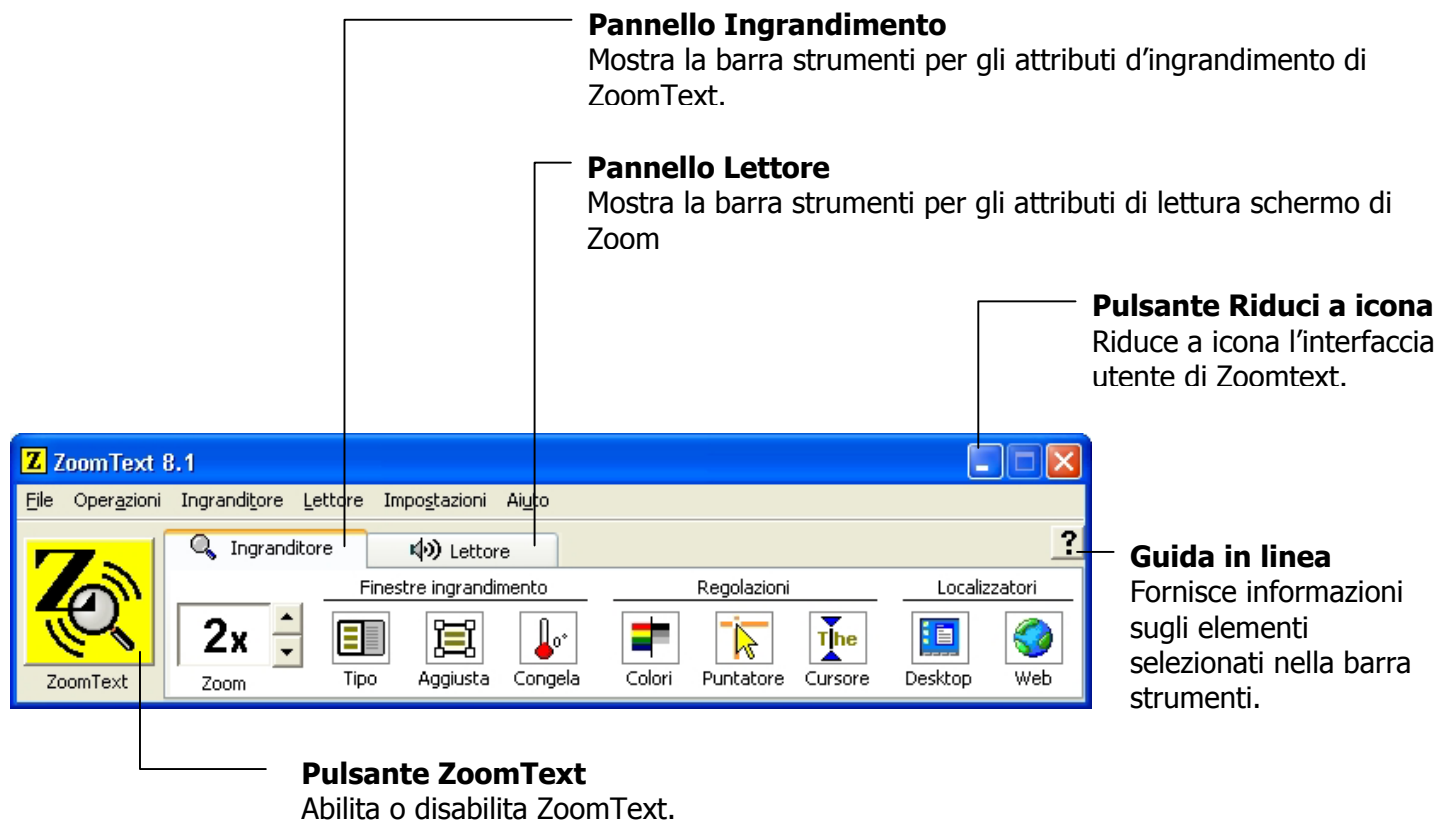

L'interfaccia utente di ZoomText può essere ridotta a icona (nascosta) o ripristinata (resa visibile) senza influire sul funzionamento di ZoomText.

### ► **Ridurre a icona ZoomText**

Fare una delle seguenti:

- Fare click sul pulsante 'riduci a icona'.
- Mentre l'interfaccia utente ZoomText è attiva premere il tasto ESC.

### ► **Ripristinare ZoomText**

Fare una delle seguenti:

- Fare click sul pulsante **ZoomText 8.1** nella barra delle applicazioni in basso.
- Premere il comando rapido Mostra Interfaccia Utente: CTRL + SHIFT + U.

## ***Abilitare e Disabilitare ZoomText***

Quando ZoomText viene eseguito sul vostro sistema, comincia automaticamente ad ingrandire e leggere il vostro schermo. Potete abilitare o disabilitare ZoomText in qualsiasi momento, senza dover uscire dalla applicazoione.. Quando viene disabilitato, lo schermo ritorna al suo stato originale (non ingrandito) e l'effetto parlato viene terminato.

### **► Attivare ZoomText**

Fare una delle seguenti:

- Nell'interfaccia utente di ZoomText, fare click sul pulsante **ZoomText**.
- Premere il comando rapido Abilita ZoomText: ALT + INSERT.

### **► Disattivare ZoomText**

Fare una delle seguenti:

- Nell'interfaccia utente di ZoomText, fare click sul pulsante **ZoomText**.
- Premere il comando rapido Disabilita ZoomText: ALT + DELETE.

## ***Barra Strumenti Ingranditore***

La barra strumenti Ingranditore fornisce un accesso veloce agli attributi di ingrandimento di ZoomText. Ogni pulsante della barra strumenti presenta un'icona intuitiva con etichetta per facilitarne l'identificazione. Molti di questi pulsanti presentano dei menu a comparsa fornendo un accesso rapido alle funzioni utilizzate. I pulsanti correlati sono raggruppati insieme ed il gruppo è identificato con un link che apre la finestra di dialogo ad essa associata. Gli attributi associati con questa barra strumenti sono descritti da pagina 10 a pagina 20.



*La barra strumenti Ingranditore*

# Impostare il livello di Ingrandimento

ZoomText fornisce una vasta gamma di livelli di ingrandimento, permettendovi di visualizzare lo schermo secondo le vostre necessità. I livelli di ingrandimento variano da 1x a 16x (da 1x a 8x ad incrementi di 1, da 10x a 16x ad incrementi di 2 e frazioni di 1.25x, 1.5x, 1.75).


## ► Regolare il livello di ingrandimento



Zoom

Nella barra strumenti, regolare il livello desiderato agendo sul quadrante **Zoom**, oppure utilizzando i comandi rapidi di ingrandimento:

Per...	Premere...
Aumentare l' ingrandimento	ALT + NUMPAD PLUS
Diminuite l' ingrandimento	ALT + NUMPAD MINUS

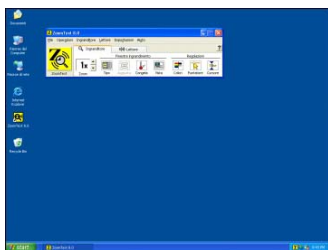

*Vista 1x (schermo normale)*



*Vista 2x*



*Vista 3x*

ZoomText fornisce otto modalità di finestre zoom: Tutto Schermo, Lente, Linea e quattro posizioni fisse. Ognuna di queste modalità offre una visione particolare di ciò che appare sullo schermo. In qualsiasi momento è possibile passare da una modalità all'altra al fine di favorire le necessità del momento.

### ► Per selezionare una modalità di finestra Zoom











Tipo

Sulla barra strumenti dell' Ingranditore, selezionare **Tipo**, quindi la finestra di zoom desiderata.


Potete anche visionare le diverse modalità premendo il comando rapido: CTRL + SHIFT + Z.

## Selezionare finestra Zoom (continua)

Tipi di finestra Zoom	
<b>Tutto schermo</b> mostra una vista ingrandita che occupa l'intero schermo.	 <i>Tutto Schermo</i>
<b>Sovrapposta</b> mostra una vista ingrandita che può essere dimensionata e posizionata in qualsiasi parte dello schermo.	 <i>Sovrapposta</i>
<b>Lente</b> si muove sopra lo schermo come una lente mostrando ciò che c'è sotto. La lente si muove seguendo i movimenti del mouse, la battitura di testo e la navigazione tra i programmi.	 <i>Lente</i>
<b>Linea</b> permette di spostarsi su e giù per lo schermo come con una sorta di righello a lente, ingrandendo la parte di testo sottostante. La finestra linea, si muove in maniera automatica seguendo i movimenti del mouse, del testo e la navigazione tra i programmi.	 <i>Lente</i>
<b>Fissa</b> divide lo screen in due, mostrando la parte ingrandita fissa da un lato e quella normale (non ingrandita) dall'altro. La vista ingrandita può essere accostata ad uno dei quattro lati dello schermo: in alto, in basso, a sinistra o a destra.	 <i>Alto</i>  <i>Sinistra</i>  <i>Basso</i>  <i>Destra</i>

La finestra di ZoomText può essere dimensionata e/o spostata per occupare una differente posizione sullo schermo (eccetto che nella modalità a Tutto Schermo).

### ► Per dimensionare e muovere la finestra di zoom

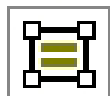

Aggiusta

1. Nella barra strumenti Ingranditore selezionare lo strumento **Aggiusta**.

*Prese di dimensionamento appaiono sul bordo della finestra zoom.*


2. Per dimensionare la finestra, trascinare una di queste prese.
3. Per spostare la finestra, trascinare all'interno del bordo.
4. Per scorrere il contenuto della finestra, tenere premuto CTRL, e contemporaneamente trascinate all'interno del bordo finestra.
5. Per uscire dallo strumento Aggiusta, premere il tasto destro del mouse oppure premere ESC.

**Nota:** Lo strumento Aggiusta diventa grigio (non attivo) quando è attiva la modalità Tutto Schermo.

## Utilizzare Congela Immagine

L'opzione Congela Immagine vi permette di monitorare il contenuto in una determinata posizione mentre state visualizzando e modificando dati altrove. La finestra Congela Immagine viene posizionata sopra la videata a tutto schermo mostrandovi la porzione da voi fissata. La finestra zoom a tutto schermo continuerà a scorrere e mostrare tutte le aree dello schermo.

### ► Per impostare una finestra Congela Immagine

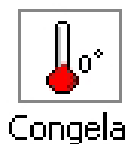

1. Impostate la modalità di finestra a Tutto Schermo.
2. Sulla barra strumenti Ingranditore, selezionare **Congela** ► **Nuova**.
3. Muovete il puntatore del mouse scorrendo l'area che si desidera fissare.
4. Trascinate per selezionare l'area da congelare.  
*La finestra 'congelata' appare con prese di dimensionamento sui bordi.*
5. Per dimensionare la finestra, trascinate una di queste prese. Per muovere la finestra, trascinate il mouse all'interno del bordo. Per scorrere il contenuto della finestra, tenere premuto CTRL e trascinare all'interno del bordo.
6. Per uscire dallo strumento Congela Immagine, premere il tasto destro del mouse, oppure premere ESC.

**Nota:** La finestra congelata può essere regolata con lo strumento **Aggiusta**.

### ► Per abilitare o disabilitare la finestra Congela Immagine

Nella barra strumenti Ingranditore, selezionare **Congela** ► **Abbilitato** (o **Disabilitato**).

Il Modo Vista mostra la parte di schermo che viene in quel momento ingrandita e permette di selezionare una nuova area di ingrandimento. Quando il Modo Vista viene attivato la funzione di Ingrandimento si disattiva e il localizzatore di vista appare nello schermo. Muovendo il localizzatore di vista, potete selezionare una nuova area da ingrandire.

### ► Per utilizzare il Modo Vista

1. Nel menu Operazioni, selezionare **Modo Vista**.

*L'ingrandimento è momentaneamente disattivato e appare il localizzatore di vista.*

2. Spostare il localizzatore di vista nella posizione desiderata.
3. Fare click nella nuova posizione per ingrandire.

*L'ingrandimento viene ripristinato nella porzione di schermo selezionata.*

È possibile configurare il localizzatore di vista per variarne la forma e i colori. Il localizzatore di vista può anche essere impostato per apparire in porzioni normali (non ingrandite) dello schermo quando si utilizzano le modalità finestra zoom Sovrapposta o Fissa.

### ► Per configurare il localizzatore di vista

1. Nel menu ingranditore, selezionate **Localizzatore Vista**.
2. Regolate le opzioni di localizzazione a piacimento.
3. Far eclick sul pulsante **OK**.

## ***Regolazione Colori***

La regolazione dei colori può favorire la lettura di testi e grafica fornendo una lettura più agevole aiutando a ridurre gli sforzi visivi. La regolazione dei colori consiste in una varietà di filtri ed effetti che regolano il colore, il contrasto e la lucentezza. È possibile utilizzare schemi preimpostati oppure configurare manualmente a vostro piacimento.

### ► **Per scegliere uno schema colore preimpostato**



Colori

Nella barra strumenti Ingranditore, selezionare **Colori** ► **Schema**, quindi lo schema colore desiderato.

### ► **Per personalizzare le impostazioni colori**

1. Nel menù Ingranditore, scegliere **Regolazione Colori**.
2. Selezionare **Personalizza**.
3. Regolare le impostazioni a piacimento.
4. Fare click sul pulsante **OK**.

La regolazione Puntatore facilita la localizzazione del puntatore mouse. È possibile regolare la dimensione e il colore del puntatore ed attivare un localizzatore che enfatizzi la posizione del puntatore sullo schermo.

### ► Per scegliere uno schema puntatore preimpostato



Puntatore

Nella barra strumenti Ingranditore, selezionate **Puntatore** ► **Schema**, quindi selezionare lo schema desiderato.

### ► Per personalizzare le impostazioni puntatore

1. Nel menu ingranditore, selezionare **Regolazione Puntatore**.
2. Selezionare **Personalizza**.
3. Regolare le impostazioni a piacimento.
4. Fare click sul pulsante **OK**.

## ***Regolazione cursore***

La regolazione cursore facilita la localizzazione del cursore sullo schermo. Un'ampia scelta di localizzatori molto visibili, segnala la posizione del cursore, senza oscurare la porzione di testo circostante. È possibile scegliere schemi preimpostati oppure personalizzare manualmente a vostro piacimento.

### ► **Per scegliere uno schema cursore preimpostato**



Cursore

Nella barra strumenti Ingranditore, selezionare **Cursore** ► **Schema**, quindi selezionare lo schema desiderato.

### ► **Per personalizzare le impostazioni cursore**

1. Nel menu Ingranditore, scegliere **Regolazione Cursore**.
2. Selezionare **Personalizza**.
3. Regolate le impostazioni a vostro piacimento.
4. Fare click sul pulsante **OK**.

Il localizzatore Desktop aiuta a individuare e ad aprire programmi e documenti posizionati sul desktop – compreso la barra di avvio veloce, la barra delle applicazioni e il pannello di controllo. Quando si lancia il localizzatore desktop, appare una finestra di dialogo mostrante la lista degli elementi presenti sul desktop. Questa lista può essere filtrata e consultata al fine di permettervi di individuare l'elemento desiderato. 'Operazioni' nel localizzatore desktop, vi permette di aprire l'elemento o visualizzare le proprietà.

### ► Per utilizzare il Localizzatore Desktop



Desktop

1. Sulla barra Ingranditore, selezionare **Desktop**.  
*La finestra di dialogo appare.*
2. Filtra e ordina la lista degli **Elementi Desktop** selezionando le opzioni desiderate sottostanti la descrizione **Visualizza Questi Elementi** e **Ordina Elementi per**.
3. Per restringere la selezione, scrivete le informazioni da ricercare nel campo **Cerca**, oppure selezionare una voce recente dalla lista a cascata.
4. Selezionare l'elemento desiderato nella lista Elementi Desktop.
5. Fare click sul pulsante **A**pri per eseguire l'elemento desiderato. Fare click sul pulsante **P**roprietà per visualizzare le proprietà dell'elemento selezionato.

Il localizzatore Web vi aiuta a individuare collegamenti e comandi in Internet Explorer, email HTML e sistemi di Help in linea. Una volta eseguito apparirà una finestra di dialogo contenente la lista dei collegamenti e dei comandi contenuti nell'ultimo documento HTML utilizzato. La lista può essere filtrata e consultata consentendovi di individuare gli elementi desiderati. 'Operazioni' vi permette di eseguire un collegamento o comando, o cominciare a leggere (con LettApp) nella posizione di un collegamento o comando.

### ► Per utilizzare il Localizzatore Web




Web

1. Sulla barra Ingranditore, selezionare **Web**.  
*Il dialogo del Localizzatore Web appare.*
2. Filtra e ordina gli Elementi della pagina Web selezionando le opzioni desiderate sotto **Visualizza questi elementi** e **Ordina per**.
3. Per restringere la ricerca, inserire le informazioni che desiderate cercare nel campo **Cerca**, oppure selezionare una voce recente dal menù a cascata.
4. Selezionate l'elemento desiderato nella lista degli elementi della Pagina Web.
5. Fate click sul pulsante **Esegui Collegamento** per eseguire il collegamento selezionato. Fate click sul pulsante **Scorri A** per individuare l'elemento selezionato. Fate click sul pulsante **Leggi Da** per cominciare a leggere (con LettApp) dalla posizione del elemento selezionato.

## Barra strumenti Lettore

La barra strumenti Lettore fornisce un accesso veloce agli attributi di lettura di ZoomText. I pulsanti della barra strumenti si presentano con un'icona intuitiva e un'etichetta per favorirne l'identificazione. La maggior parte dei pulsanti è fornita di menu a comparsa fornendo accesso veloce alle funzioni maggiormente utilizzate. Pulsanti correlati fra loro sono raggruppati insieme e il gruppo è etichettato con un link associato alla finestra di dialogo. Gli attributi associati con questa barra strumenti sono descritti da pagina 22 a pagina 35.

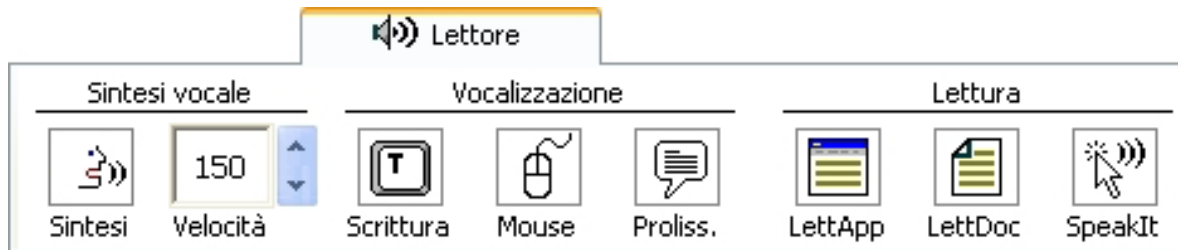

*Barra strumenti Lettore*

## Attivare la Sintesi Vocale

È possibile attivare e disattivare la Sintesi Vocale senza interferire sulla funzione d'ingrandimento.

### ► Per attivare e disattivare il la Sintesi Vocale



Sintesi

Sulla barra strumenti Lettore, selezionate **Sintesi** ► **A**abilitato (o **D**isabilitato), **OPPURE**, premete il comando rapido Sintesi Vocale: ALT + SHIFT + S

**Nota:** Gli strumenti LettApp, LettDoc e Speakit possono essere usati quando la Sintesi Vocale è disabilitata.

Potrebbero esserci situazioni dove vorrete terminare la Sintesi Vocale mentre è in esecuzione. Per esempio, in quei casi in cui ZoomText sta leggendo un messaggio a voi già familiare. Potete quindi forzare ZoomText ad interrompere la vocalizzazione di quel determinato testo senza però disattivare completamente la funzione Sintesi. Per interrompere il parlato:

Premete e rilasciate il tasto CTRL.

*La sintesi attiva in quel istante verrà interrotta*

## Regolazione della velocità di Lettura

Agendo sulla velocità di lettura è possibile regolare la sveltezza o meno del parlato (in parole al minuto).

### ► Per regolare la velocità di lettura



Nella barra strumenti Lettore, regolate il livello velocità nel quadrante, **OPPURE**, utilizzate i comandi rapidi VelocitàLettura:

Per...	Premere...
Aumentare la velocità	CTRL + TASTONUM PIU'
Diminuire la velocità	CTRL + TASTONUM MENO

Una regolazione a parte è disponibile per LettApp e LettDoc. Questa impostazione è posizionata nelle opzioni di lettura della finestra di dialogo. Nel menu Lettore, selezionate **Opzioni Lettura**.

**Nota:** Sono presenti delle regolazioni sintetizzatore aggiuntive che includono voce, tono e volume. Per agire su queste impostazioni, selezionate **Sintesi Vocale** nel menu Lettore.

## ***Impostazioni della Sintesi Vocale***

Le impostazioni della Sintesi Vocale permettono di personalizzare la voce di lettura. Potete scegliere da una varietà di voci maschili e femminili, regolando la velocità di vocalizzazione, il tono e il volume.

**Nota:** ZoomText viene fornito con tre sintesi vocali: TruVoice, ViaVoice e sintesi di Microsoft. Il programma di impostazione di ZoomText vi permette di installare qualsiasi combinazione di queste tre sintesi. ZoomText supporta anche altre sintesi SAPI che possono essere presenti sul vostro sistema.

### **► Per regolare le impostazioni della sintesi vocale**

1. Nel menu Lettore, selezionate **S**intesi Vocale...
2. Assicuratevi che la casella di controllo **A**bilita sintesi in uscita sia selezionata.
3. Scegliete un tipo di sintesi, la voce e regolate la velocità il tono e il volume come desiderate.
4. Per verificare le impostazioni date, scrivete un testo campione nella casella **T**esto di esempio e fate click sul pulsante **L**eggi Esempio.
5. Fate click sul pulsante **O**K.

La funzione Lettura Tasti ti permette di sentire a voce i pulsanti man mano che vengono premuti. È possibile scegliere tra la lettura di solo tasti, solo parole, oppure entrambi. La lettura delle parole avviene subito dopo la battitura (dopo uno spazio o una punteggiatura). Opzioni aggiuntive permettono di selezionare i tasti che si vogliono sentire letti – tasti individuali o gruppi di tasti.

### ► Per attivare la lettura tasti



Scrittura

Sulla barra strumenti Lettore, fare click su **Scrittura** e selezionare la modalità desiderata.

### ► Per regolare le impostazioni di lettura tasti

1. Nel menu Lettore, selezionare **L**ettura **T**asti.
2. Regolare le impostazioni di lettura a piacimento.
3. Fare click sul pulsante **OK**.

## ***Lettura Mouse***

Con la modalità Lettura Mouse, la lettura a voce avverrà al passaggio del mouse. Al passaggio del mouse sullo schermo, singole parole o linee complete verranno tradotte istantaneamente o dopo alcuni attimi.

### ► **Per abilitare la lettura testo**



Mouse

Nella barra strumenti Lettore, fare click su **Mouse** e selezionare l'impostazione desiderata.

### ► **Per regolare le opzioni di lettura mouse**

1. Nel menu Lettore, selezionare **Lettura Mouse**.
2. Regolate le impostazioni a piacimento.
3. Fare click sul pulsante **OK**.

Il Livello di Prolissità permette di regolare il flusso d'informazioni trasmesse relative a impostazioni di programma quando queste diventano attive. Impostazioni di programma includono: applicazioni e documenti, menu, dialoghi, pulsanti, icone e altro.

Tre livelli - Principiante, Intermedio ed Esperto - permettono velocemente di aumentare o diminuire il grado di prolissità. Il livello Principiante, fornisce maggiori informazioni, mentre il livello Esperto ne fornisce meno. Ognuno di questi livelli di prolissità può essere personalizzato interamente a proprio piacimento.

### ► Per selezionare il livello di prolissità



Proliss.

Nella barra strumenti Lettore, fare click su **Prolis.** e selezionare il livello desiderato.

### ► Per regolare le impostazioni di prolissità


1. Nel menù Lettore, selezionare **Livello di Prolissità**.
2. Regolare le opzioni di prolissità a piacimento.
3. Fare click sul pulsante **OK**.

LettApp legge documenti, pagine web e email, all'interno di una data applicazione. Nell'attivare o disattivare LettApp l'apparenza del vostro documento non cambia, favorendo una transizione uniforme tra il modo lettura e modifica dei documenti.

LettApp può leggere l'intero documento automaticamente oppure potete scegliere di leggere manualmente parola per parola, riga, frase o pragrafo. Simultaneamente alla lettura le parole vengono evidenziate. Le impostazioni di LettApp vi permettono di personalizzare l'apparenza delle parole evidenziate, inclusa la forma, la dimensione, il colore e il livello di trasparenza della parte evidenziata.

## ► Per regolare le impostazioni di LettApp

1. Nel menu Lettore, selezionare **LettApplicazioni...**
2. Regolare le impostazioni a piacimento.
3. Fare click sul pulsante **OK**.

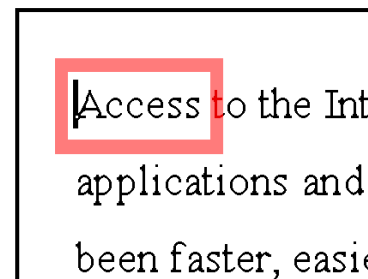

*Evidenziamento di LettApp*

## ► Per avviare e utilizzare LettApp



LettApp

1. Aprire il documento, pagina web o email che desiderate leggere.
2. Premere il comando rapido LettApp: ALT + SHIFT + A, **OPPURE**, nella barra strumenti Lettore, fare click sul pulsante LettApp.

*LettApp comincia a leggere dalla posizione in cui il cursore si trova. Se il cursore non esiste verrà evidenziata la prima parola sulla pagina.*


**Nota:** Il pulsante di LettApp viene disattivato (grigio) quando l'ultima applicazione attiva non contiene testo da leggere.

3. Per avviare e terminare la lettura automatica, premere ENTER (INVIO), **OPPURE**, fare click con il mouse.  
*Quando utilizzate il mouse potete ripristinare la lettura da una nuova posizione facendo click sulla parola che desiderate leggere.*
4. Per leggere manualmente, utilizzate i comandi di navigazione LettApp (vedi "Comandi LettApp e LettDoc " a pag. 37).
5. Per uscire da LettApp, fare click con il pulsante destro del mouse oppure premere ESC.


*Quando LettApp termina, il cursore viene automaticamente posizionato sull'ultima parola evidenziata (se il cursore esiste).*

Lettdoc legge documenti, pagine web e email in un ambiente speciale dove il testo è riformattato per una lettura più agevole. Il testo può essere rappresentato in un formato *ticker tape* (nastro) oppure *teleprompter* (gobbo elettronico) potendo regolare font, colori, evidenziazione parole e livello di zoom.

Lettdoc può leggere automaticamente l'intero documento, oppure è possibile leggere manualmente per parola, linea, frase o paragrafo. Le parole vengono evidenziate contemporaneamente alla lettura.

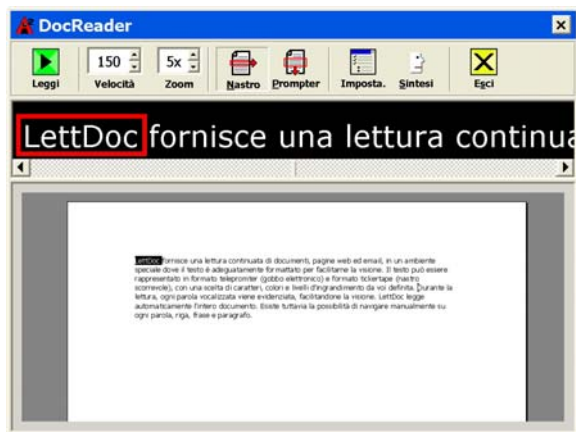

*Ticker Tape*

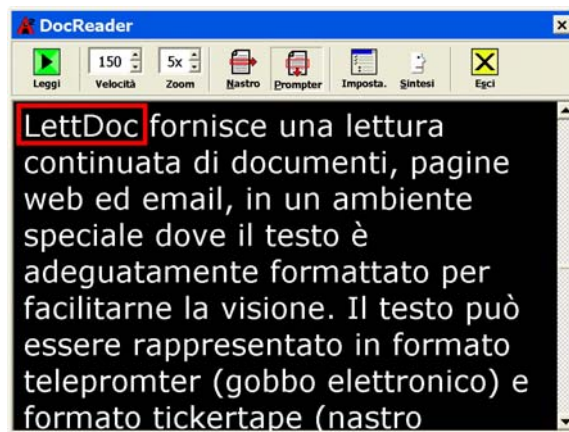

*Teleprompter*

### ► Per avviare e utilizzare LetDoc



LetDoc

1. Aprire il documento, la pagina web o email che desiderate leggere.
2. Premere il comando rapido LetDoc: ALT+SHIFT+D,  
**O**, nella barra strumenti Lettore, fare click sul pulsante **LetDoc**.

*Lo schermo LetDoc appare con il documento originale. Se il documento mostra il cursore attivo, la parola adiacente verrà evidenziata nello schermo, diversamente verrà evidenziata la prima parola dello schermo.*

Nota: Il pulsante LetDoc viene disattivato (grigio) quando l'ultima applicazione aperta non contiene testo leggibile.

3. Per attivare/disattivare la lettura automatica, fare click sul tasto Play/Pausa **OPPURE**, premere ENTER (INVIO).


*Per ripristinare la lettura, durante la Pausa, selezionare la parola del testo nel punto in cui si desidera ripartire.*

4. Per leggere manualmente, utilizzare i comandi di navigazione del LetDoc (vedi "Let.Appl. e Let.Doc. " a pag. 37).
5. Per uscire da LetDoc premere con il pulsante destro del mouse oppure premere ESC.

*Quando il LetDoc termina, il cursore del testo si posiziona automaticamente nell'ultima parola evidenziata (se esiste il cursore).*

## LettDoc (continua)

La barra strumenti di LettDoc fornisce i comandi operativi e le impostazioni che modificano l'apparenza del testo e degli elementi evidenziati.

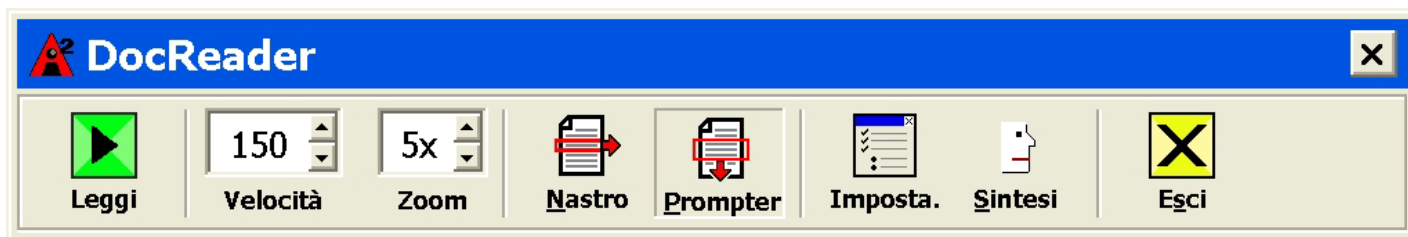


*Barra strumenti LettDoc*

- Play/Pause** Avvia e sospende la lettura delle parole evidenziate.
- Velocità** Regola la velocità di lettura – in parole al minuto.
- Zoom** Imposta il livello di Zoom attraverso LettDoc, da 1x a 16x.
- Ticker** Mostra una linea di testo che scorre orizzontalmente come un tickertape, e una vista del testo 1x che appare al di sotto.
- Prompter** Mostra righe multiple di testo che scorrono verticalmente come in un gobbo.
- Impostazioni** Apre la finestra di dialogo di Lettura per cambiare le impostazioni.
- Sint.Vocale** Apre la finestra di dialogo della Sintesi Vocale per cambiare le impostazioni.
- Esci** Esci da LettDoc e attiva l'applicazione originale.

Lo strumento SpeakIt ti permette di leggere determinate aree dello schermo selezionando o trascinando il mouse. Ogni testo visibile a video può essere vocale, anche al di fuori del programma attivo.

Nota: Il testo che appare come immagine non può essere vocale.

### ► Per utilizzare lo strumento SpeakIt

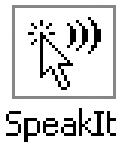

1. Nella barra strumenti Lettore, fare click sul pulsante **SpeakIt**, **OPPURE**, premere il comando rapido SpeakIt: ALT + SHIFT + I
2. Per vocalizzare una singola parola, premere sulla parola.
3. Per vocalizzare una parte di testo, trascinare il mouse per evidenziare il testo.

*Una volta rilasciato il tasto del mouse, tutti i testi evidenziati saranno vocalizzati.*

4. Per uscire da Strumenti SpeakIt, fare click con il pulsante destro del mouse oppure premere ESC.

## ***Comandi Lettura Testo***

I comandi di Lettura Testo permettono di navigare e leggere mentre state creando e modificando documenti (per parola, linea, frase o paragrafo). Quando usate questi comandi, il cursore testo si muove conformemente al comando. Per esempio, quando premete il comando Leggi Prossima Frase, il cursore si muove dall'inizio della frase successiva e l'intera frase è vocalizzata. La seguente tabella mostra i comandi di lettura testo.

Nota: Num Lock deve essere spento/off quando si usano i comandi di ZoomText che utilizzano la tastiera numerica.

<b>Comandi Lettura Testo</b>	<b>Tasti</b>
Leggi Precedente Carattere	SINISTRA
Leggi Carattere Corrente ♦	TASTONUM 5
Leggi Prossimo Carattere	DESTRA
Leggi Precedente Parola	CTRL + SINISTRA
Leggi Parola Corrente ♦♦	CTRL + TASTONUM 5
Leggi Prossima Parola	CTRL + DESTRA
Leggi Frase Precedente	CTRL + ALT + SINISTRA
Leggi Frase Corrente	CTRL + ALT + TASTONUM 5
Leggi Prossima Frase	CTRL + ALT + DESTRA

## Comandi Lettura Testo (continua)

Comandi Lettura Testo (continua)	Tasti
Leggi Riga Precedente ♦♦♦	SU
Leggi Riga Corrente	SHIFT + TASTONUM 5
Leggi Prossima Riga ♦♦♦	GIU'
Leggi Precedente Carattere	CTRL + SU
Leggi Paragrafo Corrente	CTRL + SHIFT + TASTONUM 5
Leggi Prossimo Paragrafo	CTRL + GIU'

- ♦ La seconda pressione del comando Leggi Carattere Corrente vocalizza il carattere foneticamente ("Ancona, Bologna, Como...")
- ♦♦ Ripetute pressioni del comando Leggi Parola Corrente operano come segue:
  - Prima Pressione: vocalizza la parola
  - Seconda Pressione: fa lo spelling della parola
  - Terza Pressione: fa lo spelling foneticamente ("Ancona, Bologna, Como...")Nota: Le ripetute pressioni devono avvenire entro due secondi.
- ♦♦♦ Questo comando legge la parola corrente o l'intera linea in base alle impostazioni di Lettura Tasti 'Quando il custore testo si muove in una nuova linea'.

## ***Comandi Rapidi***

I Comandi Rapidi sono delle combinazioni che i comandi di ZoomText eseguono senza doverne attivare l'interfaccia. I Comandi Rapidi esistono per quasi tutte le caratteristiche di ZoomText, permettendo di verificarne i controlli mentre un'altra applicazione è attiva.

Seguono alcune importanti informazioni relative ai Comandi Rapidi di ZoomText:

- I Comandi Rapidi possono essere cambiati o disabilitati singolarmente per eliminare conflitti con altri programmi.
- I tasti e i pulsanti del mouse possono essere usati per definire un Comando Rapido.
- Ogni Comando Rapido deve essere unico.

Ogni Comando Rapido consiste in uno o più tasti modifica e un tasto primario. I tasti modifica consistono in varie combinazioni di ALT, CTRL, SHIFT e tasti Window. Il tasto primario può essere qualsiasi tasto o pulsante del mouse.

### **► Per cambiare le impostazioni dei Comandi Rapidi**

1. Nel menù impostazioni, selezionare **Comandi Rapidi...**
2. Selezionate il gruppo e il comando rapido desiderato.
3. Regolate la combinazione di comando rapido a piacimento.
4. Ripetete il punto 2 e 3 per ogni comando che desiderate modificare.
5. Fate click sul pulsante **OK**.

**Comandi LettApp e LettDoc**

<b>Comandi Generali</b>	<b>Tasti</b>
Avvia LettApp	ALT + SHIFT + A
Avvia LettDoc	ALT + SHIFT + D
Alterna Play/Pausa	INVIO (ENTER)
Ingrandisci	ALT + TASTONUM PIU'
Riduci	ALT + TASTONUM MENO
Aumenta Velocità Lettura	CTRL + TASTONUM PIU'
Diminuisci Velocità Lettura	CTRL + TASTONUM MENO
Silenzioso	CTRL
Uscita	ESC

## ***Comandi Rapidi***

### **Comandi LettApp e LettDoc** *(continua)*

<b>Comandi di navigazione</b>	<b>Tasti</b>
Leggi Parola Precedente	CTRL + SINISTRA, O SINISTRA
Leggi Parola Corrente ♦	CTRL + TASTONUM 5, O BARRA SPAZIO
Leggi Prossima Parola	CTRL + DESTRA, O SINISTRA
Leggi Parola Sopra	SU
Leggi Parola Sotto	GIU'
Leggi Frase precedente	CTRL + ALT + SINISTRA
Leggi Frase Corrente	CTRL + ALT + TASTONUM 5
Leggi Prossima Frase	CTRL + ALT + DESTRA
Leggi Precedente Paragrafo	CTRL + SU
Leggi Paragrafo Corrente	CTRL + SHIFT + TASTONUM 5
Leggi Prossimo Paragrafo	CTRL + GIU'
Leggi Prima Parola in Riga	HOME
Leggi Ultima Parola in Riga	FINE
Pagina Su	PAG SU
Pagina Giù	PAG GIU'

**Comandi LettApp e LettDoc** *(continua)*

<b>Comandi di Navigazione</b> <i>(continua)</i>	<b>Tasti</b>
Avvio Documento	CTRL + HOME
Fine Documento	CTRL + FINE
Prossimo Collegamento	TAB
Precedente Collegamento	SHIFT + TAB
Collegamento da eseguire	CTRL + INVIO (ENTER)

- ◆ Ripetute pressioni del comando Leggi Parola Corrente operano come segue:
    - Prima Pressione: vocalizza la parola
    - Seconda Pressione: fa lo spelling della parola
    - Terza Pressione: fa lo spelling foneticamente ("Ancona, Bologna, Como...")
- Nota:** Le ripetute pressioni devono avvenire entro due secondi.

## ***Comandi Rapidi***

### **Caricamento Comandi di Configurazione**

<b>Comandi</b>	<b>Tasti</b>
Caricare la configurazione 1...9	ALT + SHIFT + 1 ...9

### **Comandi di Ingrandimento**

<b>Comandi</b>	<b>Tasti</b>
Aumenta ingrandimento	ALT + TASTONUM PIU'
Diminuisci Ingrandimento	ALT + TASTONUM MENO

**Barra Strumenti Ingranditore**

<b>Comandi</b>	<b>Tasti</b>
Tipo di finestra	CTRL + SHIFT + Z
Sistemare gli Strumenti della Finestra	CTRL + SHIFT + A
Congelare la finestra On/Off	CTRL + SHIFT + F
Regolazione Colori On/Off	CTRL + SHIFT + C
Regolazione Puntatore On/Off	CTRL + SHIFT + P
Regolazione cursore On/Off	CTRL + SHIFT + R
Localizzatore Desktop	CTRL + SHIFT + D
Localizzatore Web	CTRL + SHIFT + W

# *Comandi Rapidi*

## **Comandi vari**

<b>Comandi</b>	<b>Tasti</b>
Localizzatore On/Off	CTRL + SHIFT + L
Modo Vista On/Off	CTRL + SHIFT + V
Tipo di testo Smussato	CTRL + SHIFT + T
Mouse in Vista	CTRL + SHIFT + B
Vista su Mouse	CTRL + SHIFT + Y
Salto (Prossimi Tasti Rapidi di ZoomText)	ALT + PAUSA
AHOI On/Off	CTRL + ALT + SHIFT + A
AHOI Rapporto di Stato	CTRL + ALT + SHIFT + S
Cattura Schermo di ZoomText	CTRL + ALT + SHIFT + C
Ricerca cursore	CTRL + ALT + SHIFT + D
MSAA On/Off	CTRL + ALT + SHIFT + M
Inseguimento On/Off	CTRL + ALT + SHIFT + T
Aggiorna il Modello dello Schermo	CTRL + ALT + SHIFT + U

**Comandi Barra Strumenti Lettore**

<b>Comandi</b>	<b>Tasti</b>
Vocalizzazione On/Off	ALT + SHIFT + S
Aumento della Velocità di Lettura	CTRL + TASTONUM PIU'
Riduzione della Velocità di Lettura	CTRL + TASTONUM MENO
Modo Lettura dei Tasti	ALT + SHIFT + T
Modo Lettura del Mouse	ALT + SHIFT + M
Livello di Prolissità	ALT + SHIFT + V
Avvio LettApp	ALT + SHIFT + A
Avvio LettDoc	ALT + SHIFT + D
Strumento SpeakIt	ALT + SHIFT + I

## **Comandi Lettura Schermo**

<b>Comandi</b>	<b>Tasti</b>
Leggi Titolo Finestra	CTRL + ALT + W
Leggi Tabulati di Dialogo	CTRL + ALT + T
Leggi Messaggi di Dialogo	CTRL + ALT + M
Leggi Focus	CTRL + ALT + F
Leggi Pulsandi di Default	CTRL + ALT + B
Leggi Nome Gruppo	CTRL + ALT + G
Leggi Riga di Stato	CTRL + ALT + X
Leggi Tutto	CTRL + ALT + A
Leggi Testo Selezionato	CTRL + ALT + S
Leggi Titolo Riga Cella	CTRL + ALT + R
Leggi Titolo Colonna Cella	CTRL + ALT + K
Leggi Formula Cella	CTRL + ALT + O
Leggi Commenti Cella	CTRL + ALT + C

**Comandi Lettura Schermo** *(continua)*

<b>Comandi</b>	<b>Tasti</b>
Leggi Ora Corrente	CTRL + ALT + I
Leggi Data Corrente	CTRL + ALT + Y
Lettura Appunti	ALT + SHIFT + C
Esci	ALT + SHIFT + Q, OR CTRL
Cambia Motore Sintesi Vocale	ALT + SHIFT + E

**Comandi Interfaccia Utente**

<b>Comandi</b>	<b>Tasti</b>
Abilitare ZoomText	ALT + INS
Disabilitare ZoomText	ALT + CANC
Display Interfaccia Utente	CTRL + SHIFT + U
Aiuto Strumenti	CTRL + SHIFT + H

## ***Comandi Rapidi***

### **Comandi di Scorrimento**

<b>Comandi</b>	<b>Tasti</b>
Scorrimento Su	ALT + SU
Scorrimento Giù	ALT + GIU'
Scorrimento Sinistro	ALT + SINISTRA
Scorrimento Destro	ALT + DESTRA
Salta Su	ALT + PGUP
Salta Giù	ALT + PGDN
Salta Sinistra	ALT + HOME
Salta Destra	ALT + END
Salta Centro	ALT + NUMPAD 5
Salta Vista	ALT + NUMPAD /
Ripristina Vista	ALT + NUMPAD *

Le impostazioni di ZoomText possono essere salvate e ripristinate utilizzando i file di configurazione. I file di configurazione controllano tutte le funzioni di compreso il livello di zoom, il tipo di finestra di zoom, regolazioni dello schermo, opzioni di lettura e comandi rapidi. Non c'è limite al numero di file di configurazione salvabili, permettendo quindi di creare configurazioni personalizzate richiamabili in qualsiasi momento.

### ► Per salvare le impostazioni in un file di configurazione

1. Impostate le caratteristiche di ZoomText come desiderate.
2. Nel menù File, selezionate Salva Configurazione...

*La finestra di salvataggio configurazioni appare, mostrando i file di configurazione esistenti.*

3. Inserite il nome della nuova configurazione nel campo Nome File.
4. Fate click sul pulsante **OK**.

### ► Per caricare le impostazioni da un file di configurazione

1. Nel menù File, selezionate Apri Configurazione...

*La finestra di dialogo di Configurazione mostra i file di configurazione esistenti.*

2. Evidenziate il file di configurazione desiderato.
3. Fate click sul pulsante Apri.

## ***Configurazione di default***

Quando viene eseguito ZoomText, il file di configurazione di default Zt8.zxc, viene caricato automaticamente. Questo file contiene i default di sistema di tutte le impostazioni di ZoomText. Potete creare la vostra configurazione di default, che caricherà le vostre impostazioni personalizzate ogni volta che ZoomText verrà eseguito. Non preoccupatevi di perdere i default di sistema in quanto possono essere facilmente recuperabili.

### **► Per salvare una configurazione personalizzata di default**

1. Impostate le caratteristiche di ZoomText come desiderate.
2. Nel menù File selezionate **Salva come Default**.
3. Selezionate Si per sovrascrivere la configurazione di default corrente.

### **► Per ripristinare il file di configurazione originale**

1. Nel menù File, selezionate **Ripristina Defaults**.
2. Selezionate Si per sovrascrivere la configurazione di default corrente.



## Ai Squared

**Phone:** (802) 362-3612

**Fax:** (802) 362-1670

**Email:** sales@aisquared.com  
support@aisquared.com

**Mail:** P.O. Box 669  
Manchester Center, VT 05255 USA

**[www.aisquared.com](http://www.aisquared.com)**